

Wieder Spaß am Fernsehen

Benötigen Sie Field?

Achten Sie auf fünf Anzeichen:

- 1 Familienmitglieder beschwerten sich über die Lautstärke, wenn Sie fernsehen.
- 2 Sie müssen häufig nachfragen, was gerade gesagt wurde.
- 3 Sie sitzen so nahe wie möglich vor dem Fernseher.
- 4 Dennoch müssen Sie das Gerät noch lauter stellen.
- 5 Nach dem Fernsehen sind Sie nicht entspannt, sondern erschöpft.

Hersteller:

 **Phonic Ear**[®]
Connected to life



Ihre örtliche Bezugsquelle:



Field Ringschleifenverstärker





So macht Fernsehen zuhause wieder Spaß!

Fernsehen stellt an Ihr Hörvermögen höchste Ansprüche. Beinahe die Hälfte aller Menschen mit Hörbehinderung versteht den Fernsehton nur schlecht.

Die Lösung ist ein System, das Sie mit Ihrem Hörgerät nutzen können. Es heißt Field. Field überträgt das TV-Tonsignal drahtlos an Ihr Hörgerät, so dass Sie wieder Spaß am Fernsehen haben.

So funktioniert Field

- 1 Die Field-Station steht in der Nähe des TV-Lautsprechers. Es gibt keine komplizierten Kabelanschlüsse.
- 2 Ein unauffälliger Draht verläuft um den Hörbereich und erzeugt ein elektromagnetisches Feld.
- 3 Schalten Sie Ihr Hörgerät auf T oder MT, und das ist alles! Sie hören überall innerhalb der Ringschleife einen kräftigen, klaren TV-Ton und Ihre Familie freut sich über eine angenehme Lautstärke.

